

PERNĂ CU NĂMOL DE TURBĂ PENTRU GÂT

- dispozitiv medical clasa I

PERNĂ PENTRU GÂT umplută cu nămol de turbă natural, cu husă din 100% bumbac. După încălzire vă va oferi până la 3 ore de căldură/răcoare plăcută, ameliorând durerea. Vă rugăm să urmați instrucțiunile din manualul de utilizare. Produsul vă va fi în acest fel, un ajutor de nădejde pentru o lungă perioadă de timp.

Compoziția produsului: turbă naturală 100% folie din PVC (cod 3), husă din țesătură de bumbac (100% bumbac, TEX, cod 60)

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:

Înainte de prima utilizare scoateți produsul din punga de protective din plastic (PA/PE).

Aplicare la cald: Înainte de încălzire, scoateți produsul din cutia de carton și din husa de bumbac!

După încălzirea la temperatura necesară (50 - 60°C), vă recomandăm să testați temperatura prin palpare, puneți produsul înapoi în husa din bumbac. Metodele de încălzire adecvate sunt enumerate mai jos.

NU LĂSAȚI PRODUSUL NESUPRAVEGHEAT ÎN TIMPUL ÎNCĂLZIRII!

Încălzirea în cuptorul cu microunde: Îndoți marginea părții produsului în jos și așezați-l pe farfuria de sticlă rotativă, astfel încât produsul să nu atingă pereții cuptorului. La 600 de wați, încălziți maxim 3 minute. Dacă produsul începe să crească în volum, opriți imediat încălzirea și verificați dacă ambalajul nu a fost deteriorat. În acest caz, produsul nu trebuie încălzit în continuare! Reîncălzirea produsului este posibilă numai după ce acesta s-a răcit complet. Pentru încălzirea mai frecventă, încălziți la intervale de 10 secunde până când se atinge temperatura ideală (dar nu mai mult de 2 minute în total).

Încălzirea în cuptorul cu gaz, aer cald, sau electric: Îndoți marginea părții produsului în jos și așezați-l pe o placă/farfurie de porțelan, astfel încât produsul să nu atingă pereții cuptorului. Se încălzește la 150°C timp de maxim 10 minute. Dacă produsul începe să crească în volum, opriți imediat încălzirea și verificați dacă ambalajul nu a fost deteriorat. În acest caz, produsul nu trebuie încălzit în continuare!

Încălzirea în baie de apă (folosiți un încălzitor special cu indicator de temperatură): Puneți produsul în recipientul cu apă rece. Încălziți apa la aproximativ 80°C. Apoi opriți încălzirea și lăsați perna să se încălzească în continuare încă 5 - 10 minute în baia de apă. Apoi scoateți produsul și uscați-l. Apa nu trebuie să fiarbă! Se pot produce daune ireversibile produsului!

Aplicare la rece: Scoateți produsul din cutie de carton și din husa de bumbac și puneți-l în frigider. Se lasă la răcit aproximativ 2 ore. Nu este necesar să verificați produsul în timpul răcirii. **Nu introduceți produsul în congelator!**

DEPOZITARE ȘI MANIPULARE:

Produsul ambalat poate fi depozitat la temperaturi de 5 - 25°C. Depozitați produsul neambalat la loc răcoros și întunecat, fără fluctuații de temperatură (în mod ideal 8 - 15°C). Pentru depozitarea pe termen lung fără utilizare, este recomandabil să așezați produsul în frigider.

Acest lucru va reduce riscul de uscare a conținutului produsului (un fenomen natural al ambalajului din PVC). Produsul poate fi aruncat împreună cu deșeurile municipale normale.

ATENȚIONARE IMPORTANTĂ:

Contactul cu obiectele ascuțite, sau fierbinți, sau supraîncălzirea produsului pot duce la deteriorarea acestuia, ceea ce nu este acoperit de garanție. Produsul este testat în laborator. Nu au fost raportate efecte secundare la contactul cu pielea. Dacă amestecul de turbă pătrunde în ochi, clătiți bine cu apă rece. În caz de alergii sau hipersensibilitate a pielii la materialele utilizate, consultați medicul înainte de utilizare.

BENEFICII DE UTILIZARE:

Aplicare la cald: de exemplu pentru durerea sau rigiditatea mușchilor, articulațiilor și coloanei vertebrale, pentru dureri de origine neinflamatoare, pentru dureri menstruale, pentru afecțiuni subacute și cronice de origine reumatică, sau numai pentru încălzire. **Nu utilizați pentru dureri de origine inflamatorie, în caz de tulburări ale sistemului circulator, în stări febrile!**

Aplicare la rece: de exemplu vânătăi, lovituri, cefalee (migrenă), durere de dinți, înțepături de insecte, sângerări nazale, inflamații ale mușchilor și articulațiilor, umflături, vânătăi.